



안녕하세요,

검이경 설치순서입니다.

* 설치하실 검이경은 아래의 절차가 이루어진 후 연결해주시기 바랍니다.

1. 메일에 첨부된 압축화일을 다운 받으신후 압축을 풀어주세요
2. 압축을 해제하시면 아래와 같이 2 개의 폴더가 생성됩니다.

 UB CAM PRO INSTALL (ver 110901-3)	파일 폴더
 VIDEO CODEC INSTALL	파일 폴더

3. VIDEO CODEC INSTALL 폴더내에 있는 2 개의 프로그램을 설치해주시기 바랍니다.(순서상관없음)

 ffdshow_rev1873_20080226_cls...	2008-02-28 오후...	응용 프로그램	3,951KB
 flvsplitter	2008-03-07 오후...	응용 프로그램	232KB

4. 3 번이 완료된후 UB CAM PRO INSTALL 폴더을 열어 아래와 같은 화일을 설치해 주시기 바랍니다.

 setup	2011-10-25 오전...	응용 프로그램	784KB
---	------------------	---------	-------

5. 설치가 완료된 후 설치하실 검이경을 컴퓨터의 USB 포트에 꽂아주시면 됩니다.

6. 바탕화면상에 아래와 같은 프로그램 아이콘이 생성되면 더블클릭후 사용하시면 됩니다.(생성 안될시 PC 재부팅이 필요할 경우도 있습니다.



6. 환자관리프로그램과 연동시 환자관리프로그램 업체로 연락하시면 됩니다.

감사합니다.